



Инструкция по смене пользователя ПО «Кардиометр-МТ. Рабочее место врача»

Для смены пользователя ПО «Кардиометр-МТ. Рабочее место врача» запустите установленное приложение «Рабочее место врача», в открывшемся экране нажмите кнопку «Врачи», на следующем экране нажмите «Добавить врача»

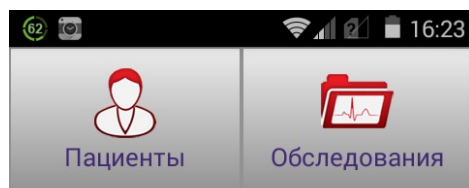


Архив:

Врач:

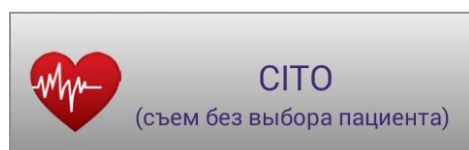


Устройство съема: не определен

v1.2.16

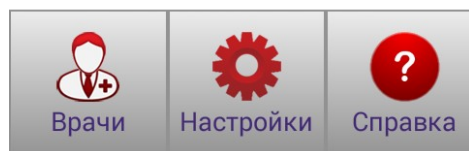

Введите учётные данные врача, нажмите «Готово». Учётная запись врача будет добавлена в список врачей работающих на этом устройстве.

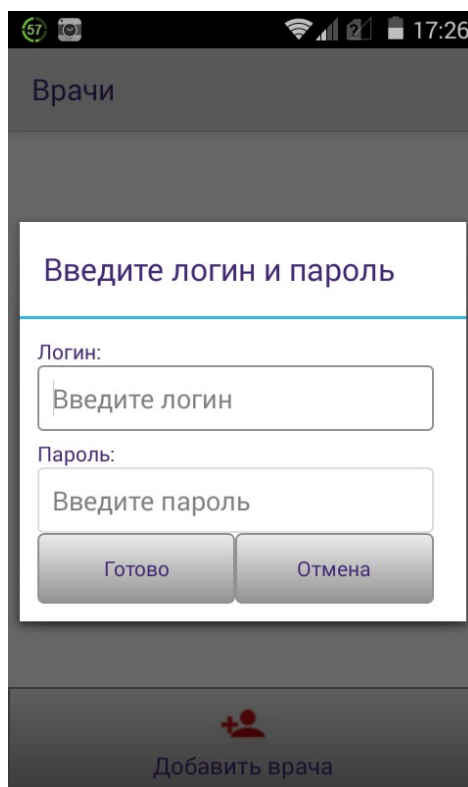

Нажмите на только что созданную запись и на следующем экране нажмите «Начать работу».
ПО «Кардиометр-МТ. Рабочее место врача» готово к работе.

Ведунов Павел Владимирович

Начальник отдела администрирования и технического обслуживания

ГБУЗ «Самарский областной медицинский информационно-аналитический центр»

тел. (846) 207-09-36(доб. 404)